



**Hygie®** Bedpan&toiletstoel  
opvangzakken

**SA-HYGIE-CLBI-000**  
20 zakken p/verpakking  
400 zakken p/omdoos



1. Product	
1.1 Presentatie	Bedpan en toiletstoel opvangzakken met treksluiting en super absorberende inlegger.
1.2 Omschrijving	Opvangzak: met blauwe PEHD treksluiting. Afm.: 62x43 cm / 24,5x18 in. Super absorberende inlegger: Non-woven structuur en super absorberende polymeren (SAP), 24x13 CM / 9,45x5, 12 in met een absorptiecapaciteit van 700 ml.
1. Gebruik	
2.1 Gebruikersinstructie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open de doos en haal de rol zakken eruit.</li> <li>2. Rol de eerste bedpan opvangzak af en scheur deze af langs de geperforeerde lijn.</li> <li>3. Open de zak, plaats deze over de bedpan en zorg dat je deze over de randen vouwt.</li> <li>4. Zorg ervoor dat de absorberende inlegger op de bodem ligt.</li> <li>5. Wacht 30 seconden totdat de inlegger (± 700 ml) in gel is veranderd.</li> <li>6. Sluit de zak door aan de treksluiting te trekken en knoop de zak eventueel dicht.</li> <li>7. Deponeer de zak bij het reguliere afval.</li> </ol>
2.2 Verwijdering	Deponeer de zak bij het reguliere afval of bij het klinische afval indien de patiënt een infectie heeft. Dit product voldoet aan de regelgeving inzake milieuvervuilingsrisico's bij verbranding en het laat geen gechloreerde derivaat vrij wat kan uitmonden in dioxine.
2.3 Voorzorg	Disposable product. Niet meer dan één keer te gebruiken. Bij oogcontact grondig spoelen met water en raadpleeg een arts indien nodig. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking tonen. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
3. Regelgeving	
3.1 Conformiteit	Voldoet aan de Europese regelgeving 93/42/CEE voor medische hulpmiddelen Class 1-CE.
3.2 Identificatie	Elk product is voorzien van een lotnummer.
3.3 Douane	5603149090 (Volgens Europese regelgeving).
3.4 Veiligheid	Dit product wordt volgens de Europese regelgeving niet gezien als gevaarlijk. Product in de originele verpakking op een droge, niet vochtige plaats bewaren. Safety date sheet op aanvraag.