



Hygie® Braak opvangzakken

SA-HYGIE-VOMO-000
20 zakken p/verpakking
400 zakken p/omdoos



1. Product	
1.1 Presentatie	Braak opvangzakken met treksluiting en super absorberende inlegger.
1.2 Omschrijving	Opvangzak: met blauwe PEHD treksluiting. Afm.: 25x25 cm. Super absorberende inlegger: Non-woven structuur en super absorberende polymeren (SAP), 24x13 CM met een absorptiecapaciteit van 600 ml.
1. Gebruik	
2.1 Gebruikersinstructie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de doos en haal de rol zakken eruit. 2. Rol de eerste opvangzak af en scheur deze af langs de geperforeerde lijn. 3. Vouw de zak open en houdt hem open met beide handen. 4. Braak in de zak. 5. Wacht 30 seconden totdat de inlegger (\pm 600 ml) in gel is veranderd. 6. Sluit de zak door aan de treksluiting te trekken en knoop de zak dicht. 7. Deponeer de zak bij het reguliere afval.
2.2 Verwijdering	Deponeer de zak bij het reguliere afval of bij het klinische afval indien de patiënt een infectie heeft. Dit product voldoet aan de regelgeving inzake milieuvuulingsrisico's bij verbranding en het laat geen gechloreerde derivaat vrij wat kan uitmonden in dioxine.
2.3 Voorzorg	Disposable product. Niet meer dan één keer te gebruiken. Bij oogcontact grondig spoelen met water en raadpleeg een arts indien nodig. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking tonen. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
3. Regelgeving	
3.1 Conformiteit	Voldoet aan de Europese regelgeving 93/42/CEE voor medische hulpmiddelen Class 1- CE.
3.2 Identificatie	Elk product is voorzien van een lotnummer.
3.3 Douane	5603149090 (Volgens Europese regelgeving).
3.4 Veiligheid	Dit product wordt volgens de Europese regelgeving niet gezien als gevaarlijk. Product in de originele verpakking op een droge, niet vochtige plaats bewaren. Safety date sheet op aanvraag.