

Urinaalhouder unisex met opvangzakken



**Urinaal
houder**

**Urine opvang-
Zakken met
Absorberende
inlegger**

**Zorg er voor dat de
patiënt in een voor hem of
haar zo comfortabel
mogelijke houding zit of
ligt. Half zittend is de
meest efficiëntste
positie.**



**Vouw de urine
opvangzak open.**



**Doe de opvang-
Zak van
bovenaf in
de houder.**



**Plaats de urine-
opvangzak op de
opening van de
houder.**



**Plaats het
absorberend
matje vooraan
gebruik voor
vrouwen en
bij gebruik bij
mannen
achterin het
Urinaal.**



**Verwijder voorzichtig
de opvangzak van de
rand van de houder.**



**Trek voorzichtig
De opvangzak uit
De urinaalhouder.**



Trek met 1 hand aan de trekkoorden en houdt met de andere hand de opvangzak vast.



**Draai het uiteinde om
en knoop de zak dicht.**



Na het dichtknopen van de zak deponert u deze Bij het daarvoor Bestemde afval.



**Voor het wegen kunt u
gebruik maken
Van de Hygie
hangweegschaal.**

